



**Situation initiale**



**Mesurer l'épaisseur de la muqueuse**



**Par ex.: gencive de 4 mm jusqu'au périoste.**



**Forer à 250 tours/min. avec la fraise jaune (seul forage dans le maxillaire supérieur!)**



**Cavité de l'os**



**Vérifier la cavité de l'os avec la sonde dentaire « KKK »**



**Forer aussi avec la fraise noire dans l'os mandibulaire. Avec elle, élargir éventuellement la cavité de l'os D1/ ou bien: utiliser ensuite la fraise blanche.**



**Vérifier la cavité de l'os une deuxième fois avec la sonde dentaire « KKK »**



**Condenseur d'un diamètre de 2,4 mm pour une cavité d'os de 2 - 20 mm.**



**Condenseur d'un diamètre de 3,0 mm pour une cavité d'os de 2 - 20 mm.**



**Vérification finale de la cavité d'os avant l'insertion de l'implant Champions®**



**On devrait obtenir une stabilité primaire de l'implant à un couple d'insertion entre 40 et 70 Ncm.**



**Optionnellement, on peut cémenter et préparer les Prep-Caps (disponibles en 15 versions avec des hauteurs et angles différents)**



**Couronne en zircon cimentée**



**Guide d'utilisation du condenseur de Champions®**